


# Elektronické čisticí pouzdro PerfectClean

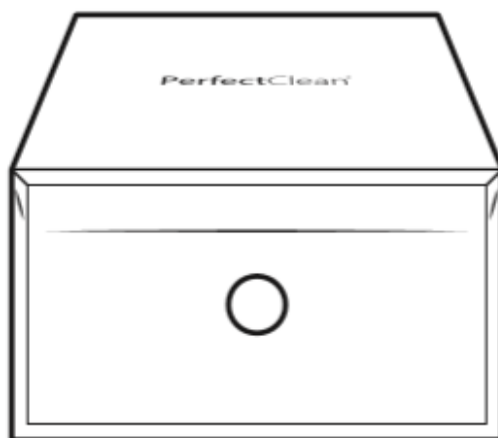

## **Návod k použití**

Děkujeme Vám za zakoupení elektronického čisticího pouzdra PerfectClean. Při správném a pravidelném používání může prodloužit životnost Vašich sluchadel.

## **Podrobnosti**

### **Čištění**

PerfectClean odstraňuje ze sluchadel ušní maz pomocí čisticího roztoku.

### **Vysoušení**

PerfectClean využívá patentovaný horkovzdušný vysoušecí systém.

## UVC

PerfectClean je vybaven krátkovlnnou UVC zářivkou, která čištění zefektivňuje a optimalizuje.

**Důrazně doporučujeme používat PerfectClean denně, aby byla zachována optimální kvalita sluchadel.**

## Bezpečnostní pokyny

- Uchovejte mimo dosah dětí.
- Uživatel smí přístroj používat pouze k čištění sluchadel a provádění údržby doporučeným způsobem, veškeré ostatní zásahy smí provádět pouze výrobcem autorizovaný servis nebo odborník.
- Nedávejte PerfectClean, napájecí zdroj nebo kabel do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu nebo zdroje, přístroj nepoužívejte a okamžitě zajistěte výměnu poškozené části.
- Používejte pouze originální napájecí zdroje.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte čisticí nebo žíravé prostředky.

Porušením bezpečnostních pokynů ztrácíte nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným používáním nebo zacházením.

## Pokyny pro manipulaci

Roztok doplňujte pouze tehdy, svítí-li příslušná kontrolka. Plňte maximálně. Ujistěte se, že víko je při zahájení cyklu zaklapnuto, jinak se přístroj nespustí. Během cyklu přístroj rozhodně neotvírejte.

Na konci cyklu se kontrolky zařízení PerfectClean automaticky vypnou. Umístěte PerfectClean na rovný, suchý a stabilní povrch. Nikdy PerfectClean nepřevracejte a nenaklánějte, ani v případě, že je

vypnutý. Nedívejte se přímo do UVC lampy umístěné ve výsuvném  
komoře. Při vypojení vypojujte napájecí zdroj, nikoli kabel.

### Doporučená údržba

Čistěte s pomocí měkkého hadříku. Nepoužívejte na čištění abrazivní  
produkty. Nevstříkujte do přístroje tekutiny.

### Signály kontrolky


Bliká pomalu MODŘE	→	Zapnutý cyklus
Svítí MODŘE	→	Pohotovostní režim
Bliká rychle MODŘE	→	Doplňte čisticí roztok. Použijte novou náplň a zcela ji vyprázdněte.
ČERVENÁ	→	Chyba. Vraťte zařízení foniatrovi.

Jedna náplň vystačí na 40–50 cyklů\* nebo 20–25 cyklů v případě, že  
je nádrž prázdná (první použití nebo vyprázdnění kvůli převozu).

\*Tento počet je pouze informativní. Může se lišit dle typu sluchadla.

## Začínáme

1

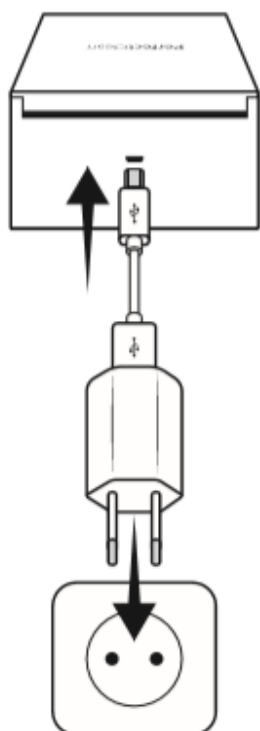


Zapojte PerfectClean. Kontrolka se rozsvítí modře, což znamená, že je přístroj zapnutý.

Pokud po dobu 30 sekund nedojde k žádné aktivitě, kontrolka se vypne.


Před prvním použitím přístroj PerfectClean naplňte (zcela vyplňte náplň), jinak cyklus nezačne. Více informací viz instrukce plnění.



Ujistěte se, že je PerfectClean v horizontální poloze, a nepřevracejte jej.

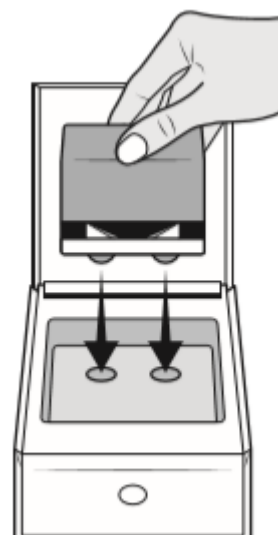


2

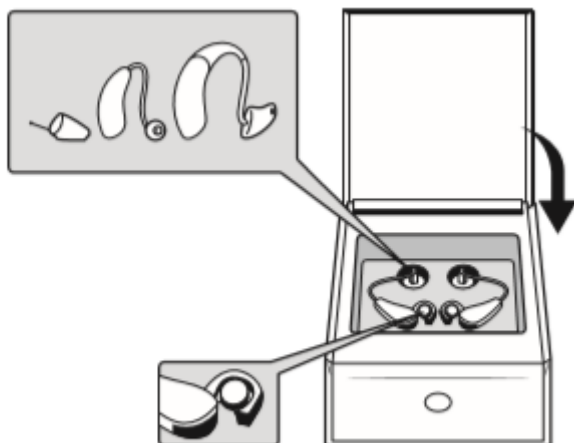


PerfectClean je vhodný pro všechny typy sluchadel. Otevřete přihrádku na baterii (baterie mohou v pouzdře zůstat) a vložte sluchadla do krabičky tak, že jejich špičky budou umístěny v příslušných otvorech. Zaklapněte víko.



Umístěte PerfectClean na hladký, rovný povrch. Nezamezujte přístupu vzduchu pod přístroj.

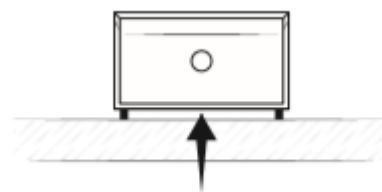

3

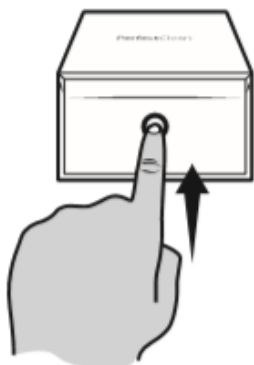

Pro zahájení cyklu **PerfectClean** stiskněte tlačítko (kontrolka blikající bíle znamená, že se požadavek zpracovává).

Modrá kontrolka pomalu bliká, čímž hlásí, že byl cyklus zahájen. Cyklus se zahájí pouze v případě, kdy je víko zaklapnuto.

PerfectClean se na konci čisticího cyklu automaticky zastaví (po 1 hodině). Kontrolka se vypne.




Po skončení cyklu otřete sluchadla čistou, savou utěrkou.



## Čištění filtru

Filtr čistěte vždy před použitím nové náplně.

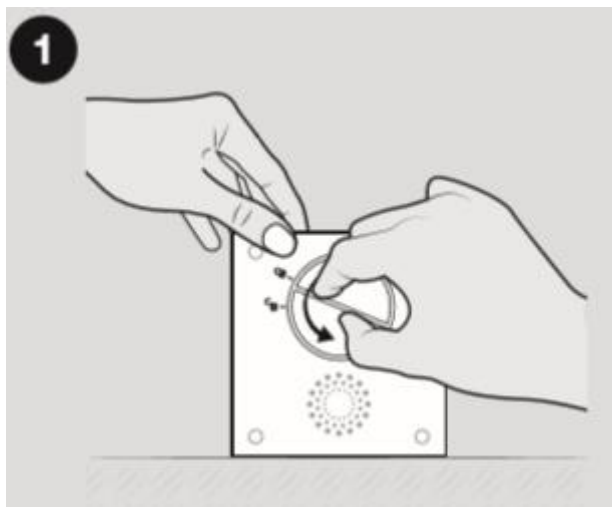

Odejměte uzávěr filtru.

PerfectClean je nutné položit na přední stranu (s tlačítkem), protože jinak by mohl roztok vytéct. Natočte uzávěr doleva na pozici otevřeného zámku.

**2**

Vyčistěte filtr.

### *Možnost A*

Lehce znečištěný filtr umyjte teplou vodou.



### *Možnost B*

Silně znečištěný filtr čistěte za použití čisticí tablety (vloďte na 20 minut do sklenice s vodou) a poté omyjte teplou vodou.

Po vyčištění umístěte uzávěr zpět a otočte jím doprava do pozice uzavřeného zámku.

## **Vyprázdnění přístroje**

Přístroj vyprázdněte v případě cestování nebo převážení.

1. Položte PerfectClean na přední stranu (strana s tlačítkem pro zahájení cyklu).
2. Odejměte uzávěr filtru tak, že otočíte uzávěr doleva do pozice otevřeného zámku.
3. Umístěte PerfectClean nad umyvadlo do horizontální polohy a nechte zbývající tekutinu vytéct.
4. Vraťte uzávěr do pozice otevřeného zámku a poté jej otočte doprava do pozice uzavřeného zámku.



## Technické parametry:

### Pouzdro

- Vnější rozměry: 68 x 122 mm, výška 106 mm
- Vnitřní rozměry: 18 x 87 mm, výška 71 mm
- Váha: 400 g
- UV zářivka: 253,7 nm
- Maximální výkon: 8,5 W
- Výkon v pohotovostním režimu: 0,04 W
- Software: ØØ PC-LOG-02.00
- Podmínky skladování: od -20 °C do +65 °C
- Teplota sušení: <48 °C
- Délka cyklu: 60 min
- Provozní teplota: od 12 °C do 40 °C

### Adaptér

- Vstup: 100–240 VAC; 50–60 Hz
- Výstup: 5 VDC 10 W mini
- Konektory: USB kabel – microUSB








### Identifikační údaje

Tyto údaje naleznete na spodní straně přístroje PerfectClean.

### Směrnice

Tento produkt splňuje nařízení směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

## Seznam zkratek

-  Volty (napájecí napětí)
-  Ampéry (spotřeba)
-  Napájení za použití USB
-  Použití pouze v interiéru
-  Vyrobeno z kopolymeru ABS s recyklačním kódem 7
-  Toto zařízení splňuje nařízení směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.
-  **LIKVIDACE**  
Přístroj likvidujte ekologicky. Staré přístroje obsahují recyklovatelné materiály, které lze znovu použít. Proto starý přístroj likvidujte odpovídajícím způsobem.

## Záruka

Záruka 24 měsíců – (včetně kabelu a transformátoru). V případě poruchy se obraťte na odborníka. Pokud bude váš přístroj vyžadovat zásah odborníka, musíte v záruční době vždy předložit doklad o zaplacení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nehodou apod., poškození způsobená tekutinou, nedbalou péčí, nevhodným používáním, jakýmkoli pokusem o rozebrání přístroje, nedostatečnou údržbou nebo jiné poškození způsobené uživatelem. Záruka se nevztahuje ani na poškození způsobené bleskem nebo jiným kolísáním v elektrickém napětí.

**V případě bouřky prosím PerfectClean preventivně vypojte.**

**Chráním prostředí, jakmile jsou sluchadla čistá, PerfectClean vypojím!**

## Výrobce

**signia**  
Life sounds brilliant.



## Distributor

Sivantos s. r. o.  
Molákova 576/11  
186 00 Praha 8 – Karlín  
Česká republika  
Tel.: 257 328 161  
E-mail: [sluchadla.cz@sivantos.com](mailto:sluchadla.cz@sivantos.com)