


Elektronické vysušovací pouzdro PerfectDry Lux

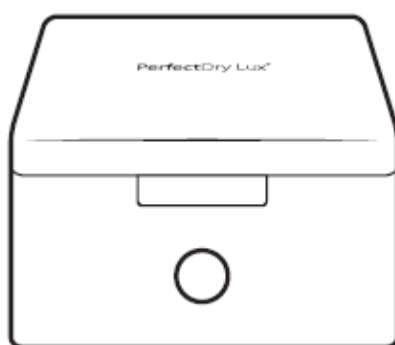

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení elektronického vysušovacího pouzdra PerfectDry Lux. Při správném a pravidelném používání může prodloužit životnost Vašich sluchadel.

Podrobnosti

360° UVC

PerfectDry Lux je vybaven krátkovlnnou UV zářivkou, která díky svému tvaru zajistí dezinfekci povrchu sluchadla ze všech úhlů. Příklad čistění zajišťuje díky kombinaci pulsního vysoušení a 360° UVC zářivky. Zářivka dezinfikuje po dobu prvních cca pěti minut cyklu, poté se automaticky vypne.

Vysoušení

PerfectDry Lux využívá patentovaný systém horkovzdušného pulsního vysoušení. Díky němu má přístroj nižší spotřebu a doba vysoušení je kratší. Teplota ve vysoušecí komoře je kontrolována elektronickým systémem, který povoluje teplotu o maximální výši 37 °C, ať už je teplota v místnosti jakákoliv, díky čemuž se sluchadla při čištění nepoškodí.

Důrazně doporučujeme používat PerfectDry Lux denně, aby byla zachována optimální kvalita sluchadel.

Bezpečnostní pokyny

- Uchovejte mimo dosah dětí.
- Uživatel smí přístroj používat pouze k čištění sluchadel a provádění údržby doporučeným způsobem. Veškeré ostatní zásahy smí provádět pouze autorizovaný servis nebo odborník.
- Zamezte kontaktu přístroje PerfectDry Lux a jeho napájecího zdroje s vodou či jinou tekutinou.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu nebo zdroje napájení, přístroj nepoužívejte a okamžitě zajistěte výměnu poškozeného komponentu v autorizovaném servisu.
- Používejte pouze originální komponenty, které jsou součástí balení.
- PerfectDry Lux umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Nedívejte se přímo do UVC zářivky umístěné ve vysoušecí komoře.
- Při vypojení zatáhněte za napájecí zdroj, nikoli za kabel.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí nebo žíravé prostředky.


Porušením bezpečnostních pokynů ztrácíte nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným používáním nebo zacházením.

Doporučená údržba

Čistěte s pomocí měkkého hadříku. Nepoužívejte k čištění abrazivní produkty. Nevstříkujte do přístroje tekutiny. Pokud PerfectDry Lux nepoužíváte, zavírejte jej, vyhněte se tak usazování nečistot uvnitř přístroje.


Začínáme

1

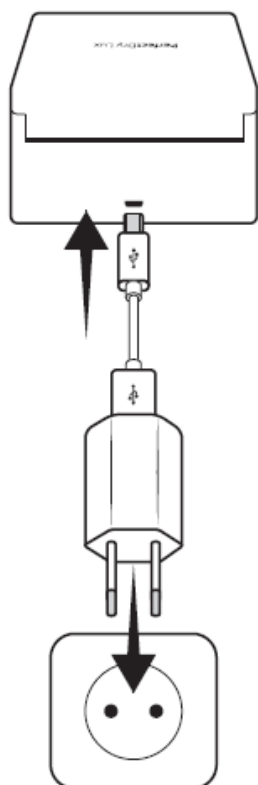


Zapojte PerfectDry Lux – připojte kabel do konektoru microUSB na zadní straně a na druhou stranu kabelu připojte síťový adaptér.

Po zapojení do sítě se indikační kontrolka rozsvítí modře, což znamená, že je přístroj zapnutý. Pokud po dobu 30 sekund nedojde k žádné aktivitě, kontrolka se vypne.

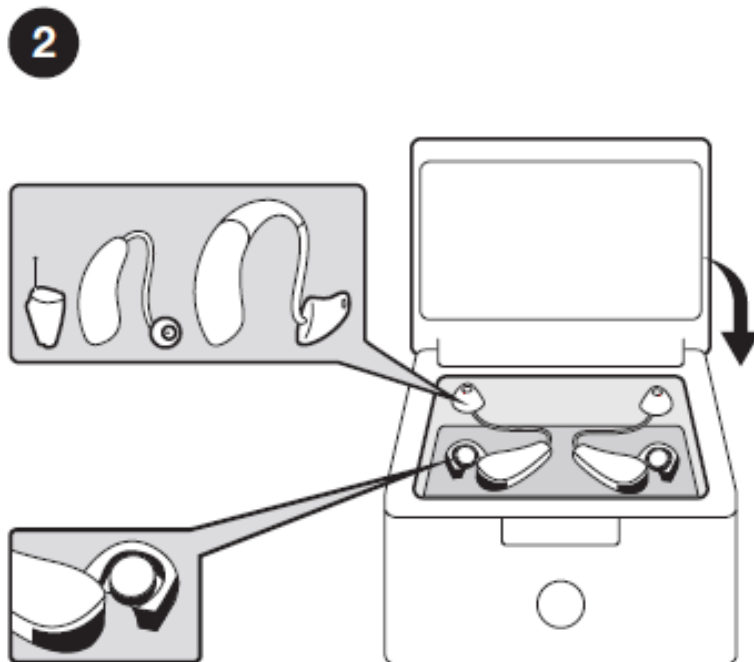

Očistěte sluchadla čisticím ubrouskem Signia, abyste odstranili přebytečnou nečistotu (ušní maz se vysoušením neodstraní). Pak otevřete přihrádku na baterie na svých sluchadlech (baterie mohou během čištění ve sluchadle zůstat). Otevřete víko přístroje PerfectDry Lux a vložte do něj sluchadla.

3

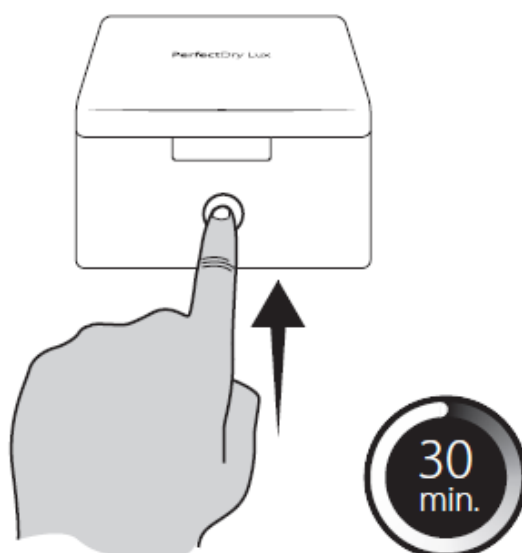

Ujistěte se, že jsou sluchadla správně vložena, a zaklapněte víko. Pro zahájení cyklu jednou stiskněte tlačítko na přední straně pouzdra. Kontrolka se pomalu rozbliká modře, čímž hlásí, že byl cyklus zahájen. Cyklus se zahájí pouze v případě, kdy je víko zaklapnut. PerfectDry Lux se na konci čistícího cyklu automaticky vypne a kontrolka zhasne. Cyklus trvá cca 30 minut.

Ujistěte se, že je víko při zahájení cyklu správně zaklapnuto. Příklad během cyklu neotvírejte – PerfectDry Lux by z bezpečnostních důvodů cyklus automaticky přerušil.

PerfectDry Lux je vhodný pro všechny typy sluchadel.

Vždy používejte pouze originální komponenty!

Technické parametry:

Pouzdro

- Vnější rozměry: 93 x 48 mm, výška 76 mm
- Vnitřní rozměry: 70 x 21 mm, výška 76 mm
- Váha: 144 g
- UV zářivka: 253,7 nm
- Maximální výkon: 4 W
- Výkon v pohotovostním režimu: 0,04 W
- Software: ØØ PDL-LOG-02.00
- Podmínky skladování: od -20 °C do +65 °C
- Teplota sušení: 37 °C
- Délka cyklu: 30 min
- Provozní teplota: od 12 °C do 40 °C

Adaptér

- Vstup: 100–240 VAC; 50–60 Hz
- Výstup: 5 VDC
- Konektory: USB kabel – microUSB

Signály kontrolky

- Bliká **modře** > Zapnutý cyklus
- Svítí **modře** > Pohotovostní režim








Identifikační údaje

Tyto údaje naleznete na spodní straně přístroje PerfectDry Lux.

Směrnice

Tento přístroj splňuje nařízení směrnice 93/42 EHS o zdravotnických prostředcích.

Seznam zkratk

-  Volty (napájecí napětí)
-  Ampéry (spotřeba)
-  Napájení za použití USB
-  Použití pouze v interiéru
-  Vyrobeno z kopolymeru ABS s recyklačním kódem 7
-  Toto zařízení splňuje nařízení směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.
-  **LIKVIDACE**
Přístroj likvidujte ekologicky. Staré přístroje obsahují recyklovatelné materiály, které lze znovu použít. Proto starý přístroj likvidujte odpovídajícím způsobem.

Záruka

Záruka 24 měsíců (včetně kabelu a transformátoru). V případě poruchy se obraťte na odborníka. Pokud bude přístroj vyžadovat zásah odborníka, musíte v záruční době vždy předložit doklad o zaplacení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nehodou apod., poškození způsobená tekutinou, nedbalým zacházením a péčí, nevhodným používáním, jakýmkoli pokusem o rozebrání přístroje nebo nedostatečnou údržbou, ani na jiné poškození způsobené uživatelem. Záruka se nevztahuje ani na poškození způsobené bleskem nebo jiným kolísáním v elektrickém napětí.

V případě bouřky prosím PerfectDry Lux preventivně vypojte.

Chráním prostředí, jakmile jsou sluchadla čistá, PerfectDry Lux vypojujím!

Výrobce**Distributor**

Sivantos s. r. o.
Molákova 576/11
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel.: 257 328 161
E-mail: sluchadla.cz@sivantos.com